



hygienicPLUS

Plošná a rýchla dezinfekcia



Názov produktu

hygienicPLUS

Oblasť produktu

Dezinfekcia

Popis produktu

Prostriedok na rýchlu dezinfekciu bez obsahu alkoholu a pripravený na použitie. Zanecháva jemnú vôňu pomaranča.

Jednotka na balenie

6 x 1 kg systémová fľaša

Art.-č. 4460100308

Hodnota pH

neutrálna

Použitie | Oblasť použitia


Čistí a dezinfikuje všetky citlivé povrchy. Špeciálne vhodný na použitie na lehátkach (soláriá, sauny, masážne stoly) a na fitness zariadenia. Ideálny na použitie v zdravotníctve. Certifikované u ÖGHMP a VAH.

Dávkovanie

hygienicPLUS naneste nezriedený na povrch, ktorý sa má dezinfikovať. Po skončení doby pôsobenia utrite dosucha všetky zvyšky produktu. Baktericídne a levurocídne podľa VAH: konc.-5 min. ÖGHMP: konc. -1 min. Účinný proti obaleným vírusom vrátane HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Corona (s ohran. virucídny účinkom podľa RKI): konc. -30 sek.; rotavírusy: konc. -30 sek.; Papova-/Polyoma-vírusy: konc. -2 min.

Tabuľka účinnosti

| Testovaný podľa VAH/ÖGHMP/ RKI / DVV | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Skúšobná norma | Doba pôsobenia | Dávkovanie | Zaťaženie |
| VAH baktericídne / levurocídne | 5 min. | 100 % | vysoke |
| ÖGHMP baktericídne / levurocídne | 1 min. | 100 % | vysoke |
| RKI / DVV obmedzene virucídny | 30 sek. | 100 % | nízke |

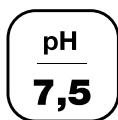



Dezinfekcia

hygienicPLUS

Plošná a rýchla dezinfekcia

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| RKI / DWV (rota vírus) | 30 sek. | 100 % | nízke |
| Testovaný podľa EN (oblasť humánnej medicíny) | | | |
| Skúšobná norma | Doba pôsobenia | Dávkovanie | Zaťaženie |
| EN 14476 virucidne (polyomavírus) | 2 min. 5 min. | 100 % 66 % | vysoké |

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. **Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie produktu.** Udržujte mimo dosahu detí.

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote.

Odporúčanie produktu

Na dezinfekciu väčších plôch odporúčame hygienic3000.

Predajná jednotka

Kus

Europaleta

342 kusov